



1. COME ESEGUIRE MASTATEST®

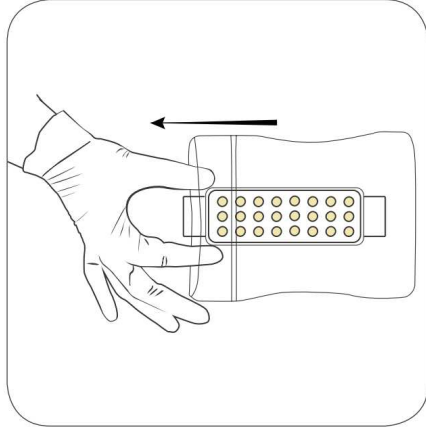


1. APRIRE

Indossando guanti puliti, rimuovere la cartuccia dal sacchetto

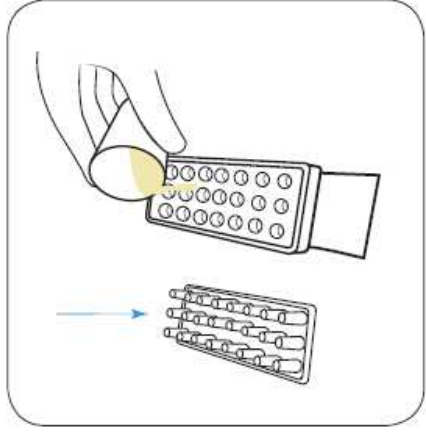


2. AGGIUNGERE UN CAMPIONE DI LATTE

Rimuovere il tappo e posizionarlo al rovescio (fare in modo di non toccare gli stantuffi). Riempire di latte metà Mastatest®.

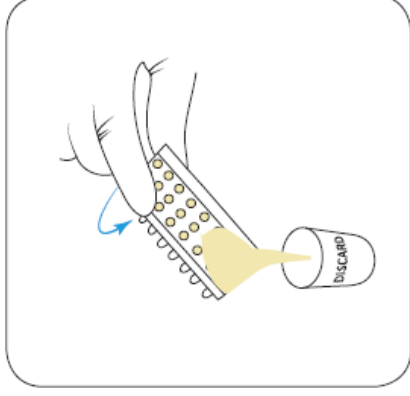


3. SMALTIRE IL LATTE IN ECCESSO

Versare via il latte in eccesso e smaltire.
Non versare nuovamente il latte in eccesso nel campione.

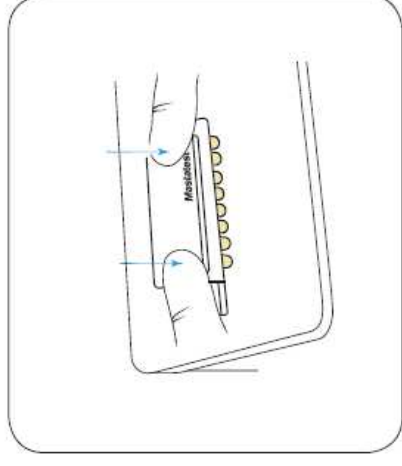


4. RIPOSIZIONARE IL TAPPO

Riposizionare il tappo (assicurandosi che sia centrato) e premere energicamente sul supporto.

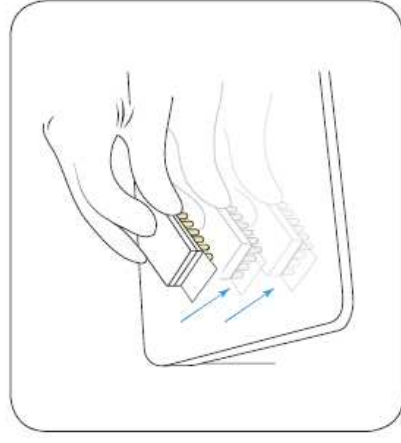


5. PREMERE ENERGICAMENTE

È importante premere energicamente, due volte.

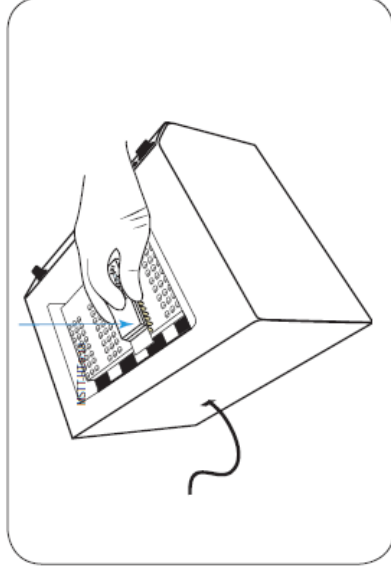

6. INSERIRE LA CARTUCCIA

Inserire nel Mastatest® Lapbox con l'etichetta del codice QR rivolta verso il basso e verso la parte posteriore del Lapbox.

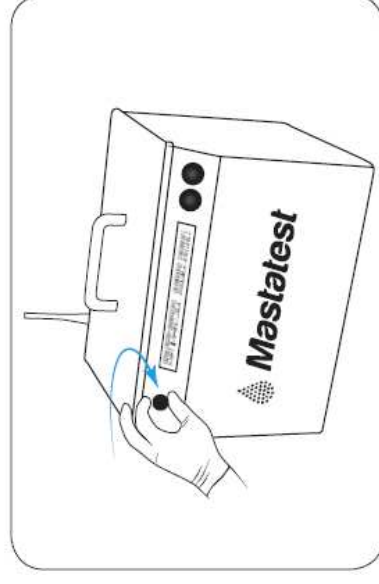

7. AVVIARE

Inserire il numero della vacca. Premere Invio per avviare il test. Risultati inviati tramite e-mail entro 24 ore.

- È importante non contaminare il campione di latte.
- Indossare guanti puliti.
- Mantenere tutte le superfici di lavoro pulite strofinandole con salviette per capezzoli.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Prodotto veterinario per uso animale.
- Dopo l'uso, riporre il test nella candeeggina prima di smaltirlo in un contenitore idoneo.