



2. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE MASTATEST®

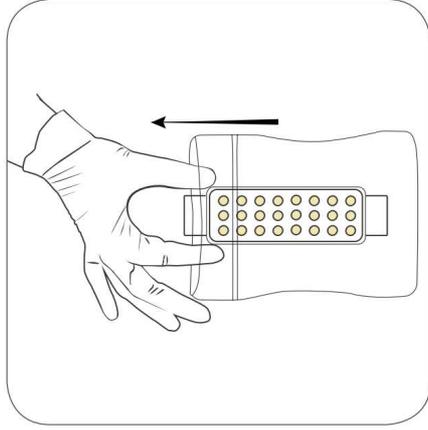


1. ABRIR

Llevando guantes limpios, saca el cartucho de la bolsa

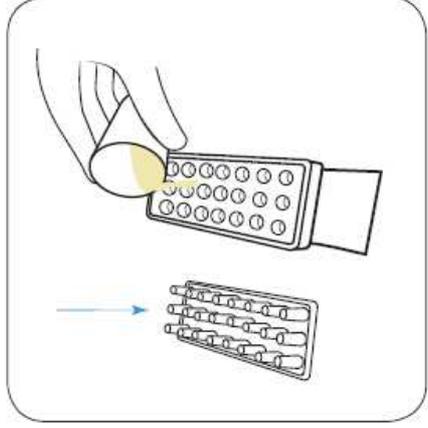


2. AÑADIR LA MUESTRA DE LECHE

Retira la tapa y déjala boca arriba (asegúrate de no tocar los émbolos). Llena Mastatest® con leche hasta la mitad.

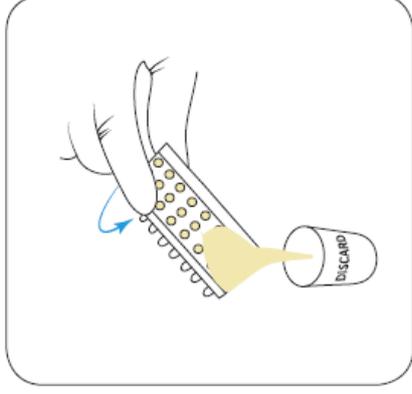


3. DESCARTAR EL EXCESO DE LECHE

Escurre la leche sobrante y elimínala. No vuelvas a verter la leche sobrante en la muestra de leche.

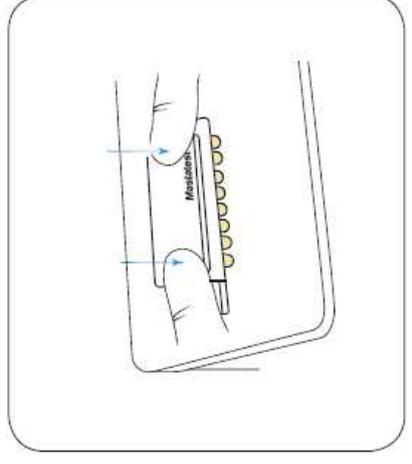


4. COLOCAR LA TAPA

Vuelve a poner la tapa (asegurándote de que está bien centrada) y presiónala con firmeza sobre la mesa.

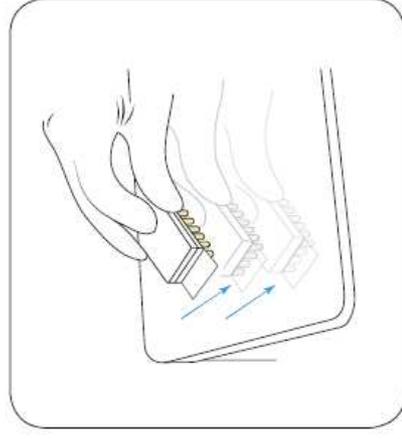


5. GOLPEAR CON FIRMEZA

Es importante que golpees dos veces con firmeza.

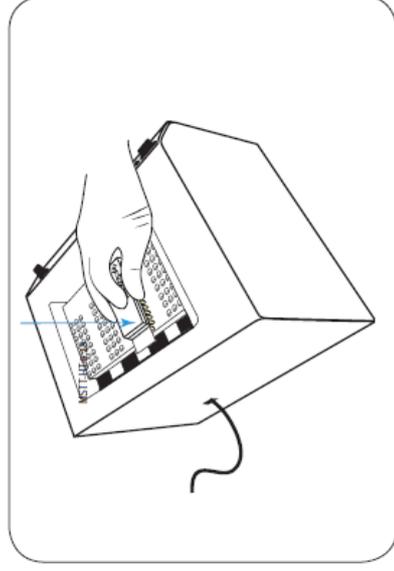

6. INSERTAR EL CARTUCHO

Insértalo en Mastatest® Lapbox con la etiqueta del código QR hacia abajo y hacia la parte posterior de Lapbox.

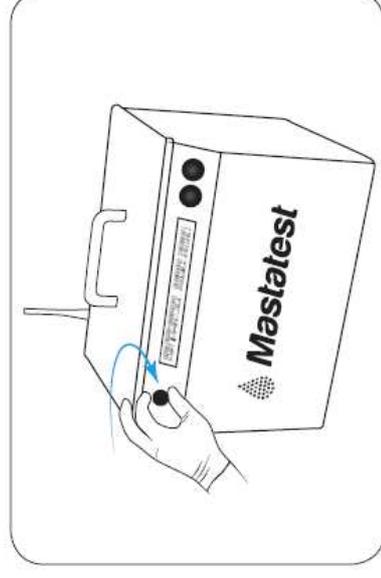

7. INICIAR

Introduce el número de la vaca. Pulsa intro para iniciar la prueba. Los resultados se enviarán por correo electrónico en un plazo de 24 horas.

- Es importante evitar la contaminación de la muestra de leche.
- Utiliza guantes limpios.
- Mantén todas las superficies de trabajo limpias, pasándolas con trapos o toallitas con desinfectante cuando sea necesario.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Producto veterinario para uso en animales.
- Después del uso, sumerge el cartucho en lejía antes de eliminarlo en el contenedor correspondiente.