



## 1. Conexión

- Conectar el cable de electricidad y el de ethernet (si está disponible)

## 2. Ajustar preferencias

- Ajustar idioma: bajar ▼, luego ENTER para confirmar
- Si la conexión por cable no se detecta:
  - ENTER para buscar redes Wifi, bajar ▼ para seleccionar, luego ENTER para confirmar
  - Introducir la contraseña: usar las teclas numéricas o moverse ▼ ▲ para seleccionar los caracteres  
Mover el cursor usando ◀ ▶
  - ENTER para guardar la contraseña, luego, para continuar ▲ ENTER
- Anotar el ID de 16 dígitos del Lapbox, después pulsar ENTER para salir de la configuración

## 3. Registrar el lapbox

Clientes nuevos: crear la cuenta en <https://vetoquinol.mastatestsystem.com/> con el código de solicitud suministrado por Vetoquinol.

Clientes ya registrados:

- Entrar en <https://vetoquinol.mastatestsystem.com/>
- Seleccionar “Mi cuenta” y “Registrar un lapbox” en el menú

### Mantenimiento de Mastatest

- Se recomienda una temperatura de 5-30°C para un funcionamiento óptimo del Lapbox
- Colocar el lapbox en un lugar limpio, seco y manejarlo con cuidado
- Mantener las superficies internas y externas limpias usando un paño húmedo (sólo con agua)
- Almacenar los cartuchos a 2-8°C y usarlos antes de la fecha de caducidad



Para más información en tu idioma [vetoquinol-mastatest.com/how-to-use](https://vetoquinol-mastatest.com/how-to-use)  
Deutsch, Français, English, Español, Italiano, Portuguese, Polski, Nederlands

### Para más información en español



La luz roja indica que está conectado a la electricidad.



La luz verde indica conexión a internet



Pulsar para mover el cursor



pulsación larga para borrar la entrada de un caracter.

Las opciones de configuración están siempre disponibles presionando  en la pantalla principal