



Rellenar un cartucho Mastatest®

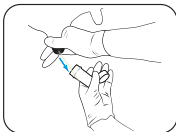


Tomar una muestra de leche limpia (ver vídeos)




Con guantes limpios, sacar el cartucho de su envase

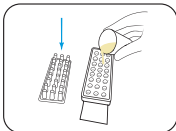


Quitar la tapa del cartucho y verter la leche hasta la mitad de la capacidad

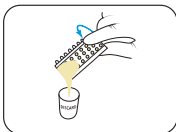


Eliminar el sobrenadante

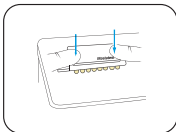

Tapar de nuevo el cartucho presionando con firmeza y escribir en la etiqueta los datos de la vaca

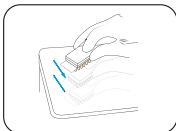

Golpear firmemente 2-3 veces; repetir si se observan burbujas en los pocillos

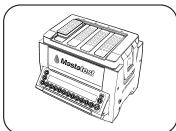

Colocar el cartucho en el lapbox con las flechas señalando hacia atrás y tapar.

Lanzar un análisis con Mastatest®

1. La posición de inicio está por defecto en la primera disponible para confirmar o moverse a la posición elegida, después

El tipo de cartucho se detectará de forma automática

Si no, seleccionar el cartucho Single (1test)

o Twin (2 tests)

2. Seleccionar **BoxStart** , o **WebStart**

3. Introducir los datos de la vaca:

- BoxStart: introducir el número de la vaca, ej.: y moverse para seleccionar el cuarto y confirmar inicio
- WebStart: Ir a <https://vetoquinol.mastatestsystem.com/>

- Cuando la analítica ha comenzado aparece un contador de tiempo en la pantalla. Se pueden lanzar más analíticas cuando se necesiten si hay huecos libres.
- Pulsar para volver a la pantalla anterior.
- Pulsación larga para borrar.
- Para comprobar o parar una analítica en marcha, moverse para seleccionar la posición , luego para comprobar o para cancelar.

