



COMMENT EFFECTUER UN TEST MASTATEST®

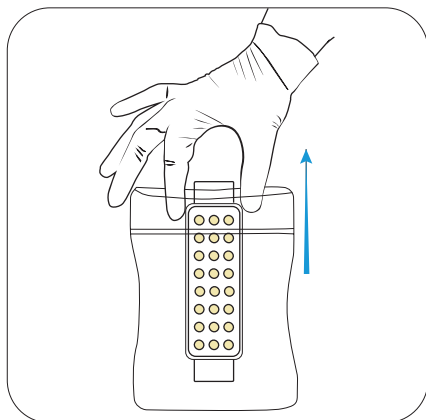


1 | OUVRIR

Après avoir mis des gants, retirez la cassette du sac.

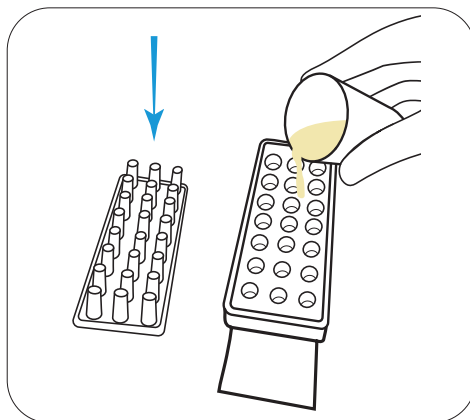


2 | REMPLIR LA CASSETTE

Retirez le couvercle et placez-le à l'envers (veillez à ne pas toucher les pistons). Remplissez la cassette Mastatest® de lait jusqu'à ce qu'elle soit à moitié pleine.

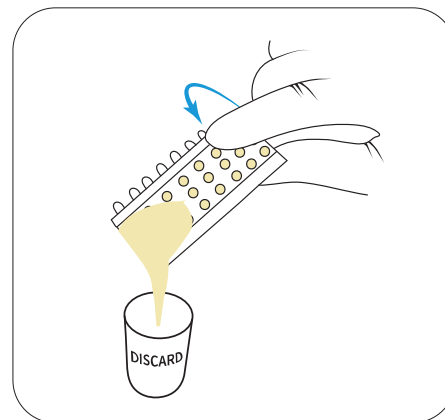


3 | JETER LE SURPLUS DE LAIT

Videz le surplus de lait et jetez-le. Ne remettez pas le surplus de lait dans le tube qui contient l'échantillon.

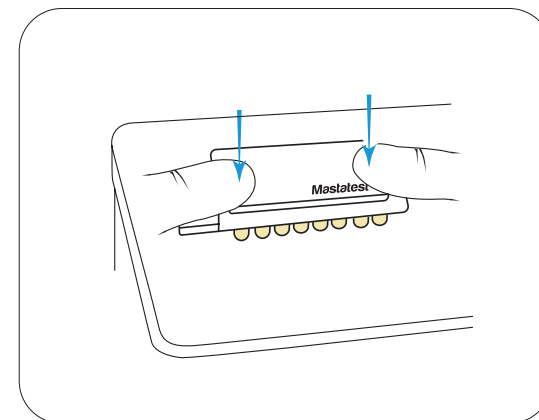


4 | FERMER LE COUVERCLE

Replacez le couvercle (en veillant à ce qu'il soit centré), posez la cassette sur une surface plane et appuyez fermement.

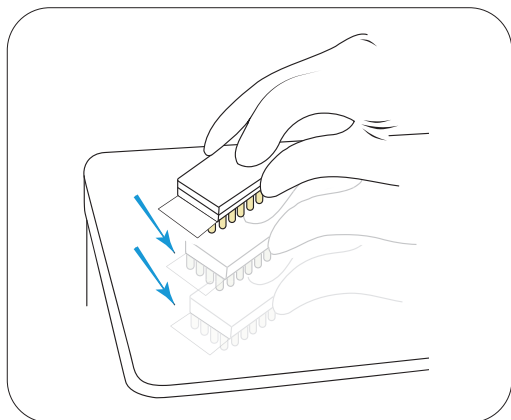

5 | TAPOTER FERMEMENT

Il est important de tapoter fermement la cassette sur une surface plane à deux reprises.

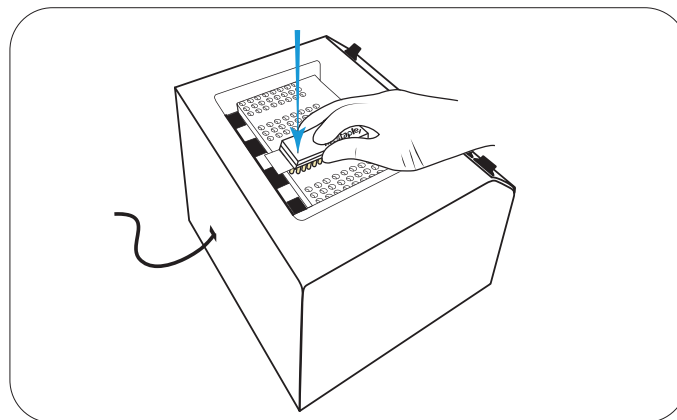

6 | INSÉRER LA CASSETTE

Insérez la cassette dans l'analyseur Mastatest® en veillant à ce que l'étiquette sur laquelle figure le code QR soit positionnée vers le bas et vers l'arrière de l'analyseur.



7 | LANCER LE TEST

Entrez le numéro de la vache. Appuyez sur Entrée pour lancer le test. Les résultats sont envoyés par courrier électronique dans les 24 heures.

COMMENT EFFECTUER UN TEST MASTATEST®

1



Veillez à ne pas contaminer l'échantillon de lait.

2



Utilisez des gants propres.

3



Assurez-vous que toutes les surfaces de travail soient propres en les essuyant avec des lingettes pour trayons.

4



Tenez hors de la portée des enfants.

5



Utilisez uniquement chez l'animal.

6



Après utilisation, placez la cassette dans de l'eau de Javel avant de la jeter dans un récipient approprié.

