


## 1. COME REALIZZARE UN CAMPIONE DI LATTE

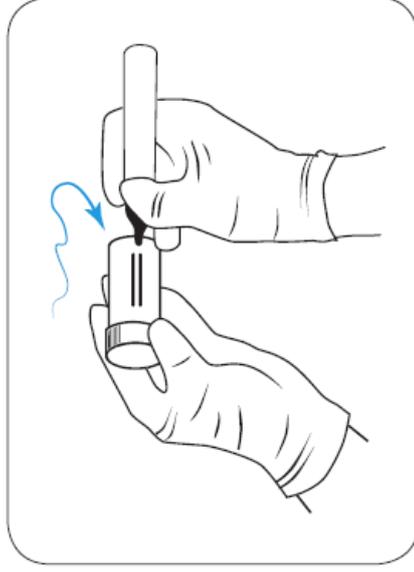

### 1. REGISTRARE

Registrare il numero della vacca, il trimestre e la data sul flacone. Utilizzare guanti puliti.




### 2. PULIRE IL CAPEZZOLO

Pulire ciascun capezzolo con un'apposita salvietta o con un batuffolo di cotone imbevuto di disinfettante per capezzoli. Utilizzare una nuova salvietta o un nuovo batuffolo di cotone sino a completare la pulizia.




### 3. PREPARARE

Preparare il flacone. Rimuovere il tappo, facendo attenzione a non toccare l'interno del tappo o del flacone. Tenere il tappo tra il pollice e l'indice al rovescio.

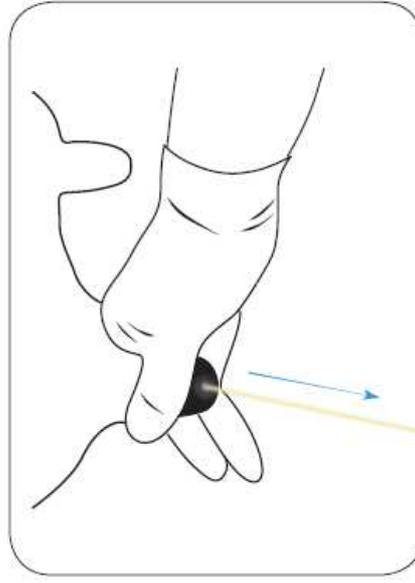


### 4. SMALTIRE

Smaltire i primi 2 o 3 spruzzi di latte.  
Avvertenza: evitare di versare il latte al suolo.

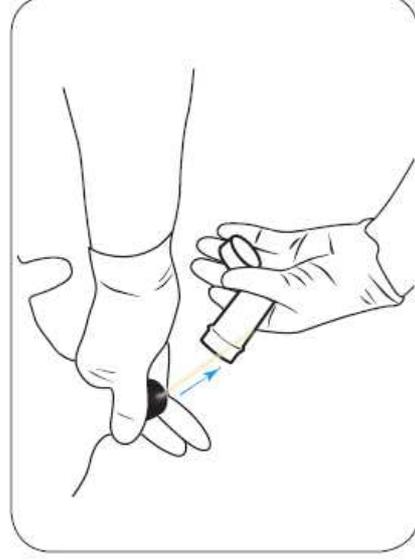

### 5. RACCOLGERE

Tenere il flacone ad un'inclinazione di 45 gradi e riempirlo per metà con il latte. Chiudere il tappo.

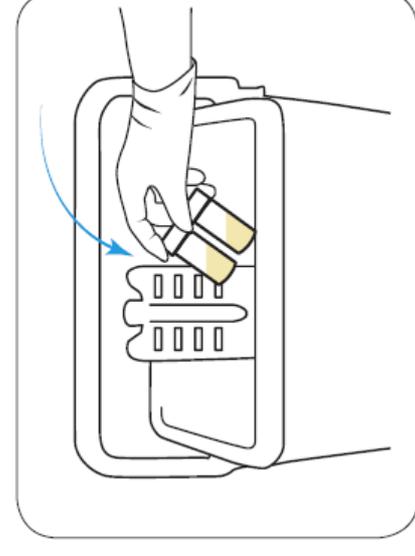

### 6. AVVIARE IL TEST O REFRIGERARE

Avviare Mastatest® il giorno stesso, oppure refrigerare il campione. Il campione deve essere conservato in frigorifero a una temperatura non superiore ai 5°C per un massimo di 48 ore.