

## 1. Connessione del Lapbox

- Collegare il cavo di alimentazione e il cavo ethernet

## 2. Configurazione del Lapbox

- Impostazione della lingua: scorrere ▼, quindi premere ENTER per confermare
- Se non viene rilevata alcuna connessione ethernet:
  - ENTER per cercare reti Wifi, scorrere ▼ per selezionare, quindi ENTER per confermare
  - Immettere la password: utilizzare i tasti numerici, o scorrere ▼ ▲ per selezionare i caratteri. Muovere il cursore utilizzando ◀ ▶
  - ENTER per salvare la password, poi ▲ ENTER per continuare
- Annotare l'ID del Lapbox a 16-cifre, ENTER per uscire dalle impostazioni

## 3. Registrare il Lapbox

Per i nuovi clienti: Creare il nuovo account su [vetoquinol.mastatestsystem.com](https://vetoquinol.mastatestsystem.com)





Per i clienti esistenti:


- Accedere al proprio account [vetoquinol.mastatestsystem.com](https://vetoquinol.mastatestsystem.com)
- Selezionare “Il mio Account” e “Registra Nuovo Lapbox” dal menu

## Cura e Manutenzione del sistema Mastatest

- Per prestazioni ottimali la temperatura ambiente consigliata è di 5-30°C (41-86°F)
- Posizionare il Lapbox su una superficie piana pulita e asciutta e maneggiare con cura
- Mantenere pulite le superfici interne ed esterne utilizzando un panno inumidito (solo con acqua)
- Conservare le cartucce a 2-8 °C (35-46 °F) e utilizzare prima della data di scadenza

### Informazioni Utente

-  La luce rossa indica che l'apparecchio è acceso.
-  La luce verde indica la connessione a Internet.
-  Per tornare alla schermata precedente.
-  Premere a lungo per cancellare un carattere inserito.

Le opzioni del menu di configurazione sono sempre disponibili premendo  quando si è nella schermata principale



Per informazioni nelle diverse lingue [vetoquinol-mastatest.com/how-to-use](https://vetoquinol-mastatest.com/how-to-use)  
Deutsch, Français, English, Español, Italiano, Portuguese, Polski, Nederlands