



1. EEN MELKMONSTER NEMEN

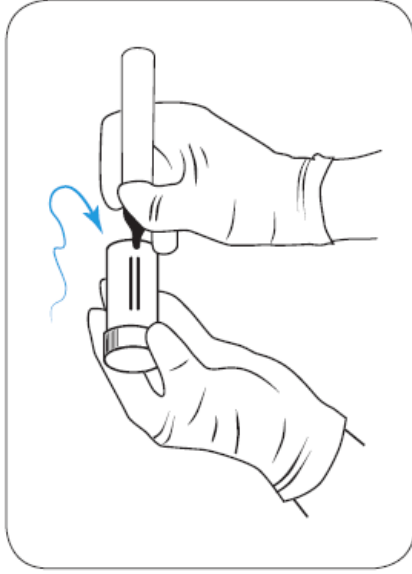

1. NOTEREN

Noteer koenummer, kwartier en datum op het potje. Draag schone handschoenen.

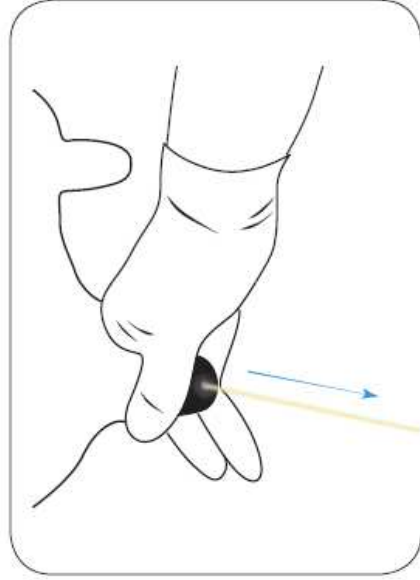

4. VOORSTRALEN


Melk de eerste 2 tot 3 melkstralen weg.

Waarschuwing: De melk mag niet op de grond belanden.



2. SPEEN REINIGEN

Desinfecteer de speentop met een ontsmettingsdoekje of een wattenbolletje gedrenkt in desinfecterend middel voor spenen. Gebruik een nieuw doekje/wattenbolletje tot ze schoon zijn.

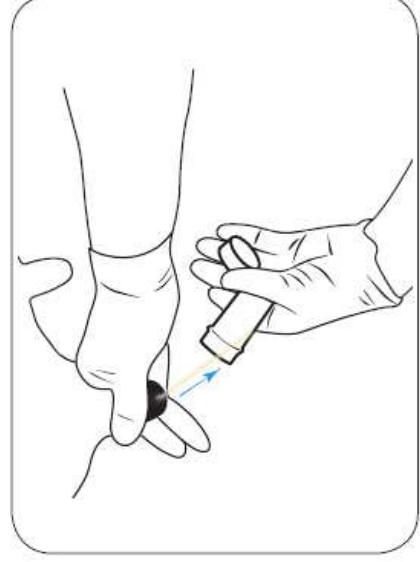


5. VERZAMELEN

Houd het potje onder een hoek van 45 graden en vul het potje voor de helft met melk. Bevestig het deksel.



3. VOORBEREIDEN

Bereid het buisje voor. Verwijder het deksel en let erop dat u de binnenzijde van het deksel of het buisje niet aanraakt. Houd het deksel met de binnenzijde naar beneden gericht tussen duim en vinger vast.

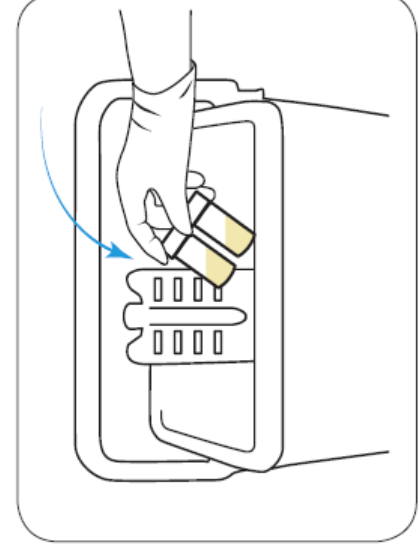

6. TEST STARTEN OF KOELEN

Start de Mastatest® dezelfde dag nog of bewaar het monster in de koeling. Het monster mag niet langer dan 48 uur bij maximaal 5° C koel worden bewaard.