



1. Lapbox™ installeren

- Sluit de voedingskabel en ethernetkabel (indien beschikbaar) aan.

2. Voorkeuren instellen

- Stel de standaardtaal in: Scroll ▼, druk vervolgens **ENTER** om te bevestigen.
- Als er geen Ethernet wordt gedetecteerd:
 - Druk op **ENTER** om te scannen naar wifi-netwerken, scroll ▼ om te selecteren en druk vervolgens **ENTER** om te bevestigen.
 - Voer het wachtwoord in: Gebruik de nummertoeetsen of pijltjes ▼ ▲ om tekens te selecteren.
Verplaats de cursor met pijltjes naar links of rechts ◀ ▶
 - Druk op **ENTER** om het wachtwoord op te slaan, en pijltje ▲ en druk **ENTER** om door te gaan.
- Noteer de 16-cijferige Lapbox™ ID en sluit vervolgens de set-up af met **ENTER**

3. Lapbox™ registreren

Voor nieuwe klanten: Maak een account aan op mastatestsystem.com

Voor bestaande klanten:

- Log in op uw mastatestsystem.com account.
- Selecteer “Mijn Account” en “Registreer een Lapbox™” uit het menu.

Mastatest®-systeem onderhouden

- Aanbevolen kamertemperatuur van 5 - 30 °C voor de beste prestaties.
- Plaats de Lapbox™ op een schoon en droog oppervlak en ga er voorzichtig mee om, om de camera binnenin te beschermen.
- Hou de interne en externe oppervlakken schoon met een vochtige doek (alleen water).
- Bewaar Mastatest®-patronen bij 2 - 8 °C, en gebruik ze vóór de vervaldatum.



Voor informatie in de gewenste taal, ga naar vetoquinol-mastatest.com/how-to-use
Deutsch, English, Español, Français, Italiano, Nederlands, Polski, Portuguese

Gebruikersinformatie

- Rood lampje geeft aan dat het apparaat is ingeschakeld.
- Groen licht geeft internetverbinding aan.
- Om terug te gaan naar het vorige scherm.
- Lang indrukken om een teken te wissen.

Opties in het instellingenmenu zijn altijd beschikbaar door op te drukken in het hoofdtestscherf.