



Hoe een Mastatest[®] patroon vullen?

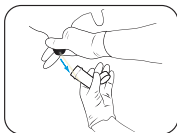


Neem een schoon melkmonster (bekijk de instructievideo).




Trek schone handschoenen aan en neem het patroon uit de verpakking.

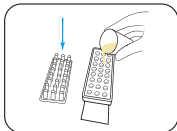


Verwijder het deksel van het patroon en vul het patroon voor de helft met melk.

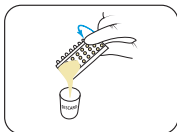


Giet de overtollige melk af en gooi weg.

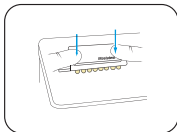

Plaats het deksel terug en druk stevig aan. Label het deksel met de koegegevens.

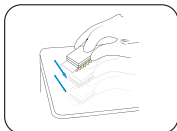

Tik 2 tot 3 keer, herhaal indien er luchtballen zichtbaar zijn in de wells.

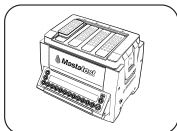

Plaats de cartridge in de LapboxTM met de pijlen naar achteren gericht en plaats het deksel terug.

Hoe Mastatest[®] starten?

1. Startpositie staat standaard op de eerste beschikbare positie.

Druk **ENTER** om te bevestigen, of scroll naar de gekozen positie **◀ ▶**, en druk dan **ENTER**

Het type cartridge wordt automatisch gedetecteerd.

Indien niet, selecteer dan Single (1 test) druk **ENTER** of Twin (2 testen) cartridge **▼** druk **ENTER**

2. Selecteer **BoxStart** druk **ENTER**, of **WebStart** **▼** druk **ENTER**

3. Voer de gegevens van het dier in:

- BoxStart: Voer diernummer in, bijv.: **1 2 3** **ENTER**

en scroll om kwartier te selecteren **▼** druk **ENTER**

- WebStart: Invoeren bij mastatestsystem.com

- Als de test gestart is, verschijnt er een aftelklok op het scherm.

Andere tests kunnen op elk moment worden gestart.

- Druk op **◀** om terug te gaan naar het vorige scherm.

- Druk lang op **◀** om te wissen.

- Om een lopende test te controleren of te annuleren, scroll naar de positie **◀ ▶** druk **ENTER**, en druk vervolgens **ENTER** om te controleren of **▼** **ENTER** om te annuleren.

