














## 1. PODŁĄCZENIE

- Do urządzenia podłącz kabel zasilania i kabel Ethernet (jeśli dostępny).

## 2. USTAW PREFERENCJE

- Wybierz język: naciśnij , a następnie  żeby potwierdzić.
- Jeśli połączenie Ethernet nie zostało wykryte:
  -  Naciśnij żeby znaleźć dostępne sieci Wi-Fi, następnie  żeby wybrać sieć, dalej wciśnij żeby zatwierdzić wybór 
  - Wpisz hasło: użyj klawiszy numerycznych lub   żeby wybrać znaki. Przesuwaj kursor używając  
  -  żeby zachować hasło   żeby kontynuować
- Zanotuj Lapbox ID. Wciśnij  żeby wyjść z ustawień

## 3. ZAREJESTRUJ LAPBOX

Dla nowych klientów: Stwórz swoje konto na platformie [vetoquinol.mastatestsystem.com](https://vetoquinol.mastatestsystem.com)

Dla obecnych klientów:

- Zaloguj się do swojego konta na platformie [vetoquinol.mastatestsystem.com](https://vetoquinol.mastatestsystem.com)
- Wybierz z menu „Moje konto”, a następnie „Zarejestruj nowe urządzenie”

### WARUNKI UŻYTKOWANIA

- Rekomendowana temperatura otoczenia dla prawidłowego działania urządzenia: 5-30°C (41-86°F).
- Umieść Lapbox na czystej, suchej powierzchni i obchodź się z nim ostrożnie, aby chronić wewnętrzną kamerę.
- Utrzymuj wewnętrzne i zewnętrzne powierzchnie urządzenia w czystości za pomocą wilgotnej ściereczki (tylko woda).
- Przechowuj wkłady testowe w temperaturze 2-8°C (35-46°F) i użyj przed upływem daty ważności.



[vetoquinol-mastatest.com/how-to-use](https://vetoquinol-mastatest.com/how-to-use)

Deutsch, Français, English, Español, Italiano, Portuguese, Polski, Nederlands