
















## 1. Conectar

- Conectar o cabo de alimentação e o cabo Ethernet (se disponível)

## 2. Ajustar preferências

- Definir Idioma: mova , depois  para confirmar
- Se não for detetada ligação Ethernet:
  -  para procurar redes wifi, mova  para seleccionar, depois  para confirmar
  - Introduzir palavra-passe: usar as teclas numéricas, ou mova   para seleccionar os caracteres. Mova o cursor usando  
  -  para guardar a palavra-passe, depois para continuar  
- Anote o ID da Lapbox de 16 dígitos e, em seguida  para sair da configuração

## 3. Registrar lapbox

Para novos clientes: Criar conta em [mastatestsystem.com](https://mastatestsystem.com)

Para clientes existentes:

- Ir para a sua conta [mastatestsystem.com](https://mastatestsystem.com)
- Seleccionar “Minha conta” e “Registar uma Lapbox” no menú

## Cuidados com Mastatest

- Temperatura da sala recomendada entre 5 e 30°C para obter um melhor desempenho
- Colocar a Lapbox num local limpo e seco e manuseá-lo com cuidado
- Mantenha as superfícies internas e externas limpas usando um pano húmido (apenas com água)
- Armazenar os cartuchos entre 2-8°C, e usar dentro da data de validade



Para obter informações no seu idioma [vetoquinol-mastatest.com/how-to-use](https://vetoquinol-mastatest.com/how-to-use)

Deutsch, Français, English, Español, Italiano, Português, Polski, Nederlands

## Informação do utilizador



Luz vermelha indica que está conectado à eletricidade.




Luz verde indica conexão à internet.



Voltar ao menu anterior.



Premir continuamente para apagar uma entrada de caracteres.

As opções do menu de configuração estão sempre disponíveis premindo em 

quando está no ecrã principal de testes