



Für Informationen in Ihrer Sprache: vetoquinol-mastatest.com/how-to-use

Deutsch, Français, English, Español, Italiano, Portuguese, Polski, Nederlands

Installieren Sie die Mastatest® Lapbox™ in 3 einfachen Schritten:

1. LAPBOX INSTALLIEREN

- Klappen Sie den Bildschirm auf, indem Sie ihn unten vorsichtig herausziehen. Zum Zusammenklappen drücken Sie die silbernen Knöpfe auf beiden Seiten der Lapbox.
- Schließen Sie die Lapbox mit den mitgelieferten Kabeln an Ethernet (LAN) und Stromquelle an (für eine Verbindung über WiFi siehe Rückseite).
- Die voreingestellte Sprache ist Englisch. Zum Ändern der Sprache scrollen Sie vom Hauptmenü aus:
 -  zu [Lapbox Konfiguration](#)  , um die [Sprache auszuwählen](#) . Dann  und .
 - Zurück zum Hauptmenü     .

2. REGISTRIEREN SIE IHRE LAPBOX (Hinweis: Falls bereits abgeschlossen, überspringen Sie diesen Schritt)

- Melden Sie sich im Portal an oder erstellen Sie ein Konto unter: vetoquinol.mastatestsystem.com.
- Wählen Sie im Menü „*Mein Konto*“, dann „*Neue Lapbox registrieren*“. Geben Sie dann folgende Daten ein:
 - Die Lapbox-ID finden Sie im Hauptmenü der Lapbox , um [Lapbox Information](#) auszuwählen.
 - Die Seriennummer befindet sich auf der Rückseite der Lapbox.
 - Zurück zum Hauptmenü gelangen Sie mit   .

3. VERBINDUNG PRÜFEN

- Prüfen Sie, ob dieses Symbol  rot links und dieses grün auf dem Bildschirm leuchtet .
- Testen Sie die Cloud-Verbindung: Lapbox-Hauptmenü nach unten , dann [Test Upload Cloud](#) auswählen mit .
- Mit  zurück zum Hauptmenü.

Die Lapbox ist jetzt einsatzbereit!

PFLEGE UND HINWEISE

- Für eine optimale Leistung verwenden Sie die Lapbox innerhalb des empfohlenen Temperaturbereichs von 5–30 °C.
- Stellen Sie die Lapbox auf einen sauberen, trockenen Tisch und gehen Sie vorsichtig damit um, zum Schutz der innenliegenden Kamera.
- Halten Sie Innen- und Außenflächen der Lapbox mit einem feuchten Tuch (nur Wasser) sauber.
- Lagern Sie die Mastatest-Kartuschen bei 2-8°C und verwenden Sie diese vor Ablauf des Verfallsdatums.

VERBINDUNG VIA WIFI

(Hinweis: Wir empfehlen Ihnen die Verbindung über Ethernet (LAN) – siehe Rückseite)

Starten Sie vom Lapbox-Hauptmenü:

1. Für WiFi konfigurieren

- Scrollen Sie runter    zu *Lapbox konfigurieren* .
- Wählen Sie *Internetverbindung einrichten* .
- Scrollen Sie runter  zu *WiFi einrichten* , Lapbox startet neu .

2. Netzwerk-Namen eingeben (SSID)

- Scrollen Sie mit    zu *Lapbox konfigurieren*, dann .
- Scrollen Sie mit  zu *WiFi-Verbindung einrichten*, dann .
- , um nach Netzwerken zu suchen, navigieren Sie mit  zu Ihrem Netzwerk. Mit  auswählen.
- Mit  zu *WiFi-Verbindung einrichten*.

Hinweis: > -65dBm und 2.4 GHz WiFi erforderlich

3. Netzwerkpasswort eingeben

- Scrollen Sie mit  zu *WiFi Passwort eingeben*, dann .
- Geben Sie das WiFi-Passwort ein.   Zum Zeichen auswählen . Wenn Sie fertig sind, drücken Sie **lange** auf .
- Zum Speichern drücken Sie erneut .
- Gehen Sie zurück   zum Hauptmenü   .

4. Verbindung prüfen

- Scrollen Sie runter  zu *Test upload Cloud*, dann .
- Mit  zurück zum Hauptmenü.

Für mehr Informationen in Ihrer Sprache:

www.vetoquinol-mastatest.com/how-to-use

Deutsch, Français, English, Español,
Italiano, Portuguese, Polski, Nederlands

