


Mastatest®: Befüllen der Kartusche

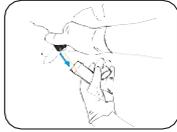

Nehmen Sie eine steril entnommene Milchprobe ohne Konservierungsmittel (siehe Anwender-Videos).



Ziehen Sie saubere Handschuhe an und nehmen Sie die Kartusche aus der Verpackung.



Nehmen Sie den Deckel von der Kartusche ab und befüllen Sie die Kartusche zur Hälfte mit Milch.



Gießen Sie die überschüssige Milch ab und werfen Sie den Überschuss.



Setzen Sie den Deckel wieder auf und drücken Sie diesen fest nach unten. Beschriften Sie den Deckel mit den Angaben zur Kuh.



Klopfen Sie die Kartusche 2-3-mal kräftig auf einen harten Untergrund. Wiederholen Sie den Vorgang, wenn Luftblasen in den Vertiefungen sichtbar sind.



Legen Sie die Kartusche mit den Pfeilen nach hinten in die Lapbox™ und setzen Sie den Deckel wieder auf.



vetoquinol-mastatest.com/how-to-use

Deutsch, Français, English, Español, Italiano, Portuguese, Polski, Nederlands

Mastatest®: Test starten

Erster Schritt:

- Wählen Sie im Hauptmenü der Lapbox *Mastatest starten*
- Wählen Sie den freien Platz: Wenn der erste freie Platz verwendet werden soll, oder scrollen Sie , um den Platz auszuwählen, bestätigen mit

Option 1: BoxStart

- Testtyp auswählen:
 - Klinisch
 - Hohe ZZ
- Wählen Sie *BoxStart*
- Geben Sie die Kuhnummer ein (z.B. 00123) und scrollen , um das Viertel auszuwählen
- Start bestätigen mit

Option 2: QuickStart

- Scrollen Sie nach unten, um den Testtyp auszuwählen:
 - Klinisch *QuickCM*
 - Hohe ZZ *QuickSCC*
- Geben Sie die Testdetails innerhalb von 21 h unter vetoquinol.mastatestsystem.com ein

Nächste Schritte:

- Countdown-Timer zeigt die verbleibende Testzeit an
- Ergebnisse: automatische E-Mail innerh. 24 h
- Weitere Tests können unabhängig voneinander gestartet werden

