





Más información en tu idioma en vetoquinol-mastatest.com/how-to-use Deutsch, Français, English, Español, Italiano, Portuguese, Polski, Nederlands

Instala tu Lapbox[™] de Mastatest[®] en 3 sencillos pasos:

a a a a a a

1. INSTALACIÓN

- Despliega la pantalla desde abajo (para plegarla, presiona los botones plateados a cada lado de Lapbox)
- Conecta el Lapbox a Ethernet (LAN) y enciéndelo usando los cables suministrados (para conectarse a través de WiFi, consulta la página 2)
- El idioma preseleccionado es inglés. Para cambiarlo, desplázate por el menú:
 - 🔽 hasta *Configure Lapbox* 💵 , 💟 💟 y *Select Language* 💵 desplázate 💟 y selecciona
 - Vuelve al menú principal:
- 2. REGISTRO
 - Accede o crea tu cuenta en vetoquinol.mastatestsystem.com
 - Vete al menú del portal, selecciona Mi Cuenta y después en Registra tu Nuevo Lapbox. Luego, introduce:
 - El ID del Lapbox (desde el menú principal del Lapbox,
 - El Número de Seria (en la parte de atrás del Lapbox)
 - En el Lapbox, usa C C C para regresar al menú principal
- 3. COMPRUEBA LA CONEXIÓN
 - Comprueba que la luz $\widehat{\frown}$ verde aparece en la parte derecha de la pantalla del Lapbox.
 - Comprueba la conexión (en el menú principal del Lapbox, desplázate hacia abajo 🔽 seleccional Subir un Test a la Nube y presiona^{ENTER})

MANTENIMIENTO

- El rango de temperatura para obtener resultados óptimos debe estar entre 5-30°C.
- Coloca tu Lapbox en un lugar limpio y seco controlando que la cámara interna se trata con cuidado.
- Mantén limpia y seca la parte exterior usanto un paño húmedo (usar sólo agua) ۰
- Mantén los cartuchos entre 2-8°C y úsalos siempre antes de la fecha de caducidad



para seleccionar Información del Lapbox ENTER)

CONEXÍON VÍA WIFI

(Nota: se recomienda la conexión por cable - ver la página 1 para la conexión vía ethernet Comenzar desde el menú principal del Lapbox:

- 1. Configurar la WIFI
 - Desplazarse
 Desplazar
 - Seleccionar Configurar Conexión Internet
 - Desplazarse para *seleccionar Configurar WIFI* ever esperar a que el Lapbox se reinicie al pulsar ever
- 2. Configurar Red SSID
 - Despazarse **OOO** a *Configurar Lapbox* , después
 - Despazarse 💟 a *Configurar Conexión WIFI* , después
 - 💵 para buscar redes, después desplazarse 💟 para buscar tu red
 - ENTER para seleccionarla
 - Salir 🔿 🔿 a Configurar Conexión WIFI

Nota:se necesita una WiFi >65DBM y 2.4GHz

3. Introducir contraseña

v

- Desplazarse 💟 a Configurar Contraseña WiFi, después 🞟
- Introducir la contraseña WiFi utilizando

y we para seleccionar los caracteres. Pulsación larga en we cuando esté completa

- Presionar
 Inter de nuevo para guardar
- Desplazarse
 O
 O
 O
 D
 o
 para volver al menú principal

4. Comprobar la conexión

- Desplazarse 💟 hasta Subir Test a la Nube, después 💵
- 🔷 al menú principal

Para más información en tu idioma: www.vetoquinol-mastatest.com/how-to-use Deutsch, Français, English, Español, Italiano, Portuguese, Polski, Nederlands

