


1. SO WIRD EINE MILCHPROBE ENTNOMMEN



1. BESCHRIFTUNG

Notieren Sie die Nummer der Kuh, das Viertel und das Datum auf dem Probenröhrchen. Verwenden Sie saubere Handschuhe.

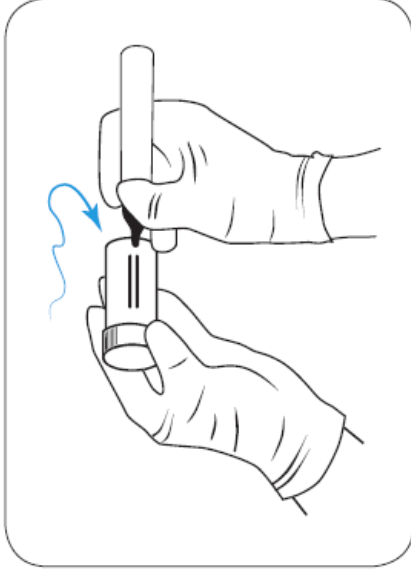


2. REINIGEN DER ZITZEN

Desinfizieren Sie jede Zitze mit einem in Desinfektionsmittel getränkten Tuch oder Wattebausch. Verwenden Sie ein neues Tuch oder Wattebausch, bis die Zitze sauber ist.



3. VORBEREITUNG


Entfernen Sie den Deckel und achten Sie darauf, das Innere des Deckels oder des Röhrchens nicht zu berühren. Halten Sie den Deckel zwischen Daumen und Finger mit der Innenseite nach unten.

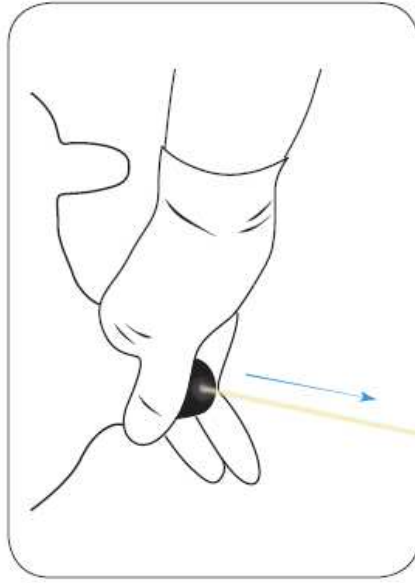

4. VERWERFEN


Verwerfen Sie die ersten 2 bis 3 Strahlen Milch.

Achtung: Die Milch sollte nicht auf den Boden gemolken werden -> Vormelkbecher.

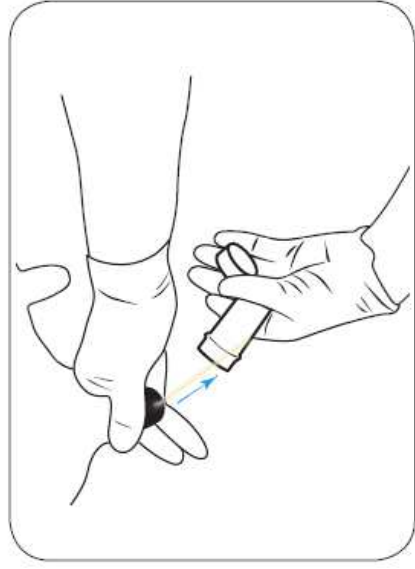

5. MILCHPROBE NEHMEN

Halten Sie das Probenröhrchen im 45-Grad-Winkel und befüllen Sie es bis zur Hälfte mit Milch. Deckel zuschrauben.

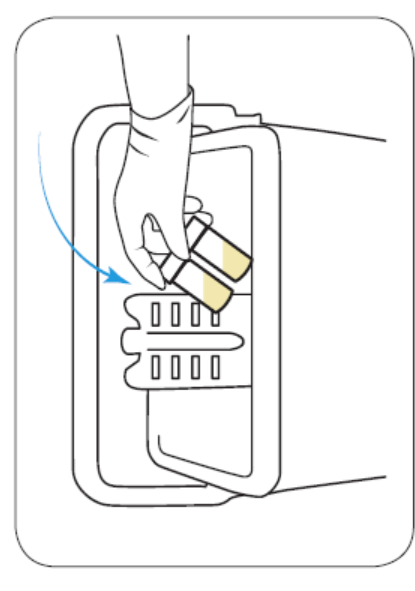

6. TEST STARTEN ODER IM KÜHLSCHRANK AUFBEWAHREN

Starten Sie Mastatest® am selben Tag oder bewahren Sie die Probe andernfalls im Kühlschrank auf. Die Probe darf nicht länger als 48 Stunden bei maximal 5 °C im Kühlschrank aufbewahrt werden.