


1. JAK POBRAĆ PRÓBKĘ MLEKA




1. ZAPISZ

Zapisz numer krowy, ćwiartkę i datę na pojemniku. Natóż czyste rękawice.

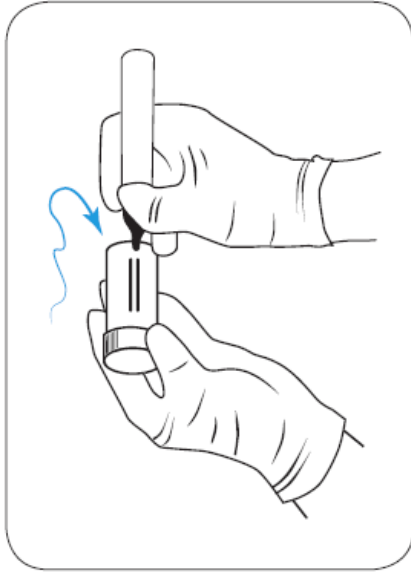

2. WYCZYŚĆ WYMIĘ


Wyczyść każde wymię specjalną chusteczką do czyszczenia wymion lub bawełnianym wacikiem nasączonym środkiem do dezynfekcji wymion. Wymieniaj chusteczkę/wacik na nowy aż wymię będzie czyste.

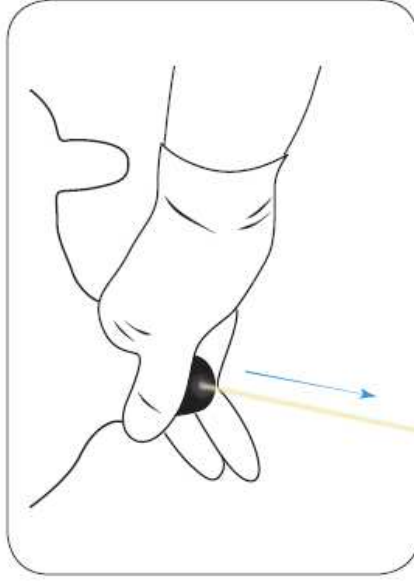

4. ODLEJ

Odlej pierwsze 2-3 strużki mleka.

Ostrzeżenie: Mleko nie powinno rozlać się na podłogę.

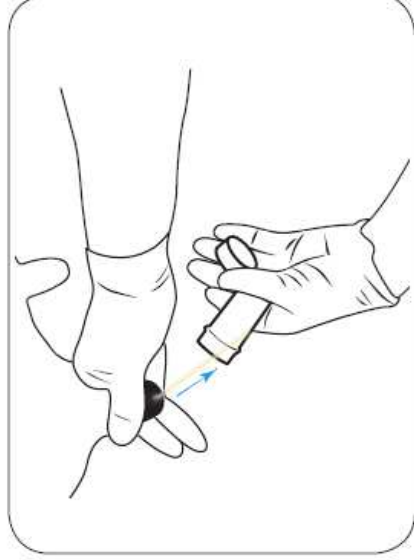


5. POBIERZ

Trzymaj pojemnik pod kątem 45 stopni i napełnij je do połowy mlekiem. Natóż pokrywkę.



3. PRZYGOTUJ

Przygotuj pojemnik. Zdejmij wieczko, uważaj, by nie dotknąć wnętrza wieczka ani pojemnika. Trzymaj wieczko między kciukiem a innym palcem, wewnętrzną stroną do dołu.

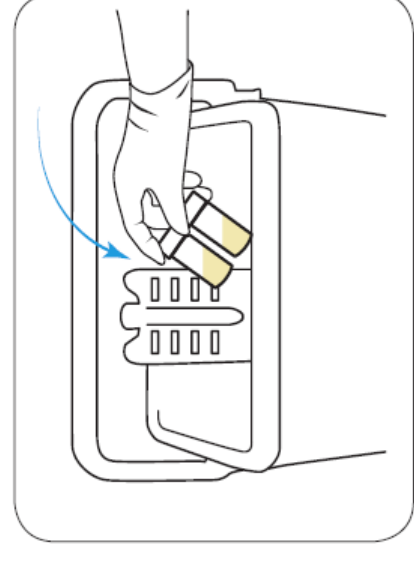

6. ROZPOCZNIJ TEST LUB WŁÓŻ DO LODÓWKI

Rozpocznij Mastatest® tego samego dnia lub ewentualnie włóż próbkę do lodówki. Próbkę należy przechowywać w lodówce w temperaturze nieprzekraczającej 5°C i nie dłużej niż 48 godzin.