


1. COMO TIRAR UMA AMOSTRA DE LEITE



1. REGISTRAR

Registre o número da vaca, o quarto e a data no recipiente. Use luvas limpas.

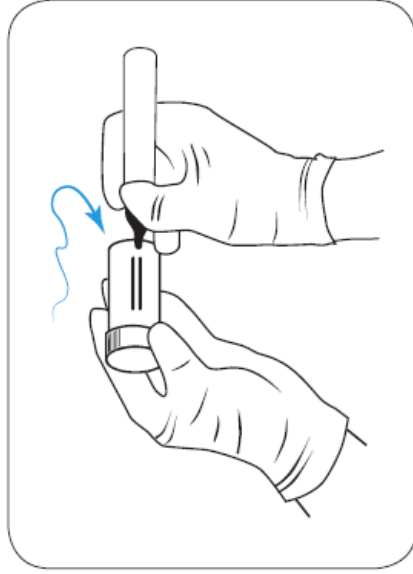


2. LIMPAR TETA

Esfregue cada teto com um toalhete específico para tetos ou com uma bola de algodão embebida em desinfetante para tetos. Utilize um novo toalhete/bola de algodão até estar bem limpa.



3. PREPARAR


Prepare o tubo. Retire a tampa, tendo o cuidado de não tocar no interior da tampa ou do tubo. Segure a tampa entre o polegar e o dedo com o interior para baixo.

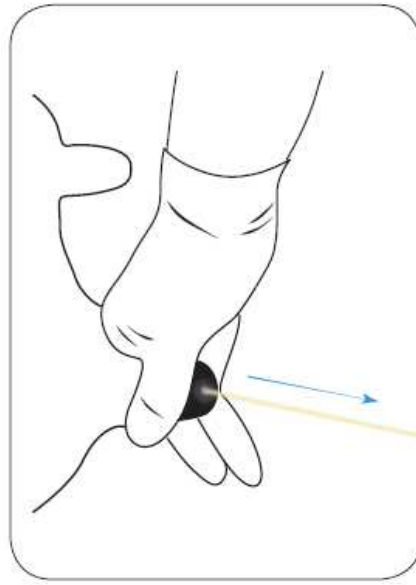

4. DESCARTE


Descarte os primeiros 2 a 3 esguichos de leite.

Advertência: O leite não deve ser derramado para o chão.

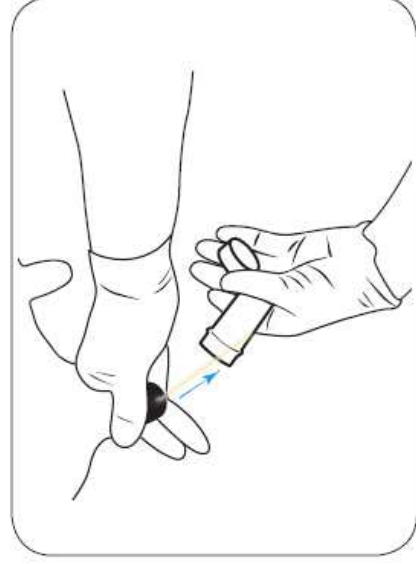

5. RECOLHER

Segure o recipiente num ângulo de 45 graus e encha o recipiente com leite até meio. Coloque a tampa.

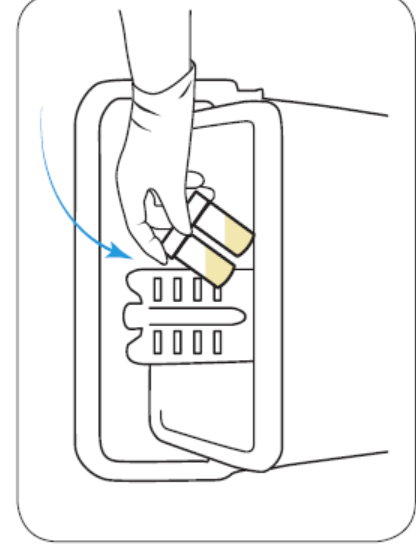

6. INICIAR TESTE OU REFRIGERAR

Inicie o Mastatest® no próprio dia ou, em alternativa, refrigere a amostra. A amostra deve ser mantida no frigorífico a uma temperatura máxima de 5 °C e por um período não superior a 48 horas.